



LINA est un fauteuil relax à oreilles qui se distingue par son design aux lignes simples et intemporelles.

Dans ses versions inclinables, il propose plusieurs options de mécanismes, avec assise et repose-pieds en revêtement continu.

Ce fauteuil est particulièrement adapté à un usage intensif grâce à sa structure intérieure en bois massif renforcé, recouverte de mousse de polyuréthane expansé.

LINA constitue le complément idéal pour tout espace de détente, hall d'accueil ou chambre. Ses nombreuses possibilités de finitions en font le choix parfait pour créer des ambiances chaleureuses et accueillantes.

FICHE TECHNIQUE

LINA

Design: **Seniorcare Estudio**





FICHE TECHNIQUE

LINA

Design: **Seniorcare Estudio**



USAGE

Indiqué pour les espaces d'attente et de détente ainsi que pour les chambres des patients et des résidents.

ASSISES ET DOSSIERS

La structure intérieure du fauteuil est réalisée en bois massif, avec des côtés en MDF. Le système de suspension de l'assise et du dossier repose sur des sangles élastiques NEA haute durabilité. La forte teneur en caoutchouc des sangles NEA leur confère une grande résistance et d'excellentes performances.

L'ensemble est recouvert de mousse de polyuréthane flexible haute densité : 30 kg/m³ pour les assises et 28 kg/m³ pour les dossiers, avec résilience HR. Revêtement continu de l'assise et du repose-jambes afin d'éviter tout interstice susceptible de provoquer des blessures.

ACCOUDOIRS

Les accoudoirs tapissés disposent d'une structure interne en bois massif de pin, avec des côtés en aggloméré. Ils sont recouverts de mousse de polyuréthane flexible haute densité (28 kg/m³) et haute résilience HR.

Il est également possible d'intégrer des accoudoirs tapissés amovibles, facilitant le transfert latéral de l'utilisateur.

PIEDS

En polypropylène noir. En option, en bois massif verni, disponible dans les couleurs suivantes : bois naturel, noyer ou chêne, moyennant supplément.

MÉCANISMES

Mécanisme relax Manuel : permet à l'utilisateur de régler manuellement l'inclinaison coordonnée du dossier et du repose-pieds.

Mécanisme relax Manuel - position GRAVITÉ ZÉRO : permet à l'utilisateur de régler manuellement l'inclinaison coordonnée du dossier et du repose-pieds.

Permet d'adopter la position **GRAVITÉ ZÉRO**. Dans cette position, les jambes sont au même niveau que le cœur pour favoriser la circulation sanguine. Il s'agit d'une position de relaxation où les muscles lombaires et cervicaux se détendent car ils subissent une moindre pression.

Mécanisme relax à moteur : permet à l'utilisateur de régler manuellement l'inclinaison souhaitée. Alimentation par courant électrique.

Lors de l'ouverture, le maintien du bouton enfoncé permet d'accompagner le mouvement jusqu'à la position finale de relaxation ou de l'interrompre à tout moment en position intermédiaire. Une fois refermé, le fauteuil revient en position assise.

Mécanisme relax à moteur + releveur : permet à l'utilisateur de régler à l'aide d'une télécommande l'inclinaison souhaitée. Alimentation par courant électrique.

Lors de l'ouverture, le maintien du bouton enfoncé permet d'accompagner le mouvement jusqu'à la position finale de relaxation ou de l'interrompre à tout moment en position intermédiaire.

Une fois refermé, avec le même bouton, l'utilisateur peut poursuivre le mouvement jusqu'à la position debout.

Dans les versions électriques, il est également possible d'incorporer, en option, la position **GRAVITÉ ZÉRO**. Dans cette position, les jambes sont au même niveau que le cœur pour favoriser la circulation sanguine. Il s'agit d'une position de relaxation où les muscles lombaires et cervicaux se détendent car ils subissent une moindre pression.

TRANSPORT

La version TRANSPORT intègre une poignée de transport et des roulettes de 75 mm de diamètre, modèle Agila de Tente, de très haute qualité, dont deux sont équipées de freins, permettant ainsi de bloquer le fauteuil lorsqu'il est à l'arrêt.

Les roulettes du modèle Lina sont conformes à la norme UNE-EN 12530 :1999 – Roulettes et supports roulants. Roulettes et supports roulants pour équipements de collectivités manœuvrés manuellement.

ESSAIS RÉALISÉS. CONFORMITÉ À LA NORME.

Essais réalisés chez : AIDIMME - INSTITUT TECHNOLOGIQUE MÉTALMÉCANIQUE, DU MEUBLE, DU BOIS, DE L'EMBALLAGE ET DES SECTEURS ASSOCIÉS

Les essais réalisés sur le modèle correspondent à ceux requis et applicables, conformément aux normes suivantes :

-UNE-EN 16139:2013vc2015, Mobilier. Résistance, durabilité et sécurité. Exigences pour les sièges à usage non domestique dans des conditions d'utilisation publique de Niveau 1 - Général.

Les procédures d'essai sont décrites dans les normes suivantes :

-UNE-EN 1728:2013, Mobilier. Sièges. Méthodes d'essai pour la détermination de la résistance et de la durabilité,

-UNE-EN 1022:2019, Mobilier. Sièges. Détermination de la stabilité.

Les essais ont été réalisés conformément aux procédures décrites dans les normes mentionnées, et les résultats obtenus sont **CONFORMES**.

Par ailleurs, un essai de durabilité du mécanisme d'inclinaison a été réalisé selon la norme **UNE-EN 13759:2012-1**, Mobilier. Mécanismes de fonctionnement pour sièges et canapés-lits. Après application du nombre de cycles spécifié, aucune perte de fonctionnalité n'a été constatée.

ÉCOLOGIE

Certificat ISO 14001.

Les processus de production de SENIORCARE INTERIORS sont certifiés selon la norme environnementale ISO 14001, dans le but de minimiser tout impact sur l'environnement.

Seniorcare Interiors est inscrite au Registre de l'Empreinte Carbone, de la Compensation et des Projets d'Absorption de CO₂ du Ministère de la Transition écologique et du Défi démographique.
Code d'empreinte carbone : 2024-a3268

CERTIFICATS ET NORMES

Certificat ISO 9001

SENIORCARE INTERIORS est certifiée ISO 9001 pour la gestion de la qualité sur l'ensemble de ses processus de conception, de fabrication et de commercialisation de ses produits.

GARANTIE

5 ans

FINITIONS

Bois : disponible dans les teintes suivantes : bois naturel, noyer, chêne (nuancier bois).

Tissus : dans tous les tissus indiqués dans notre nuancier.

Tous nos tissus — à l'exception de l'Apollo — sont en vinyle et possèdent des propriétés antibactériennes, antimicrobiennes et antifongiques.

Ils offrent une haute résistance à l'abrasion, atteignant dans certains cas jusqu'à 300 000 cycles Martindale.

POIDS MAXIMUM RECOMMANDÉ

140 kg

POIDS DU PRODUIT :

LIN0011TA : 35 kilos

LIN0013TA : 40 kilos



Sillón relax LINA Manual
LIN0011
H 112 x W 70 x D 82cm
SH 46 cm | AH 62 cm



Sillón fijo LINA
LIN0012
H 112 x W 70 x D 82/170
cm
SH 46 cm | AH 62 cm



Sillón relax LINA motorizado
LIN0013
+reincorp LIN0005
H 112 x W 70 x D 82/170 cm
SH 46 cm | AH 62 cm



Aumento opción sillón traslado
LIN0011



senior**care**

Camino de la Estación s/n
Polig. i-4, Parcela 5
03330 CREVILLENTE (Alicante)
Tels.: +34 96 540 53 30 / 96 540 35 12
Fax: +34 96 668 05 62
e-mail: info@seniorcare.es

www.seniorcare.es