



NEW CLOE es un relax de diseño refinado y elegante. Óptimo para usos intensivos en zonas de descanso. Estructura interior en madera maciza reforzada recubierta de espuma de poliuretano expandido. El complemento perfecto en cualquier ambiente de descanso o hall. Asiento y piecera tapizado continuo para una mayor seguridad durante su uso. Ideal para lograr ambientes hogareños de gran calidez.



USO

Indicado para para zonas de descanso y habitaciones.

ASIENTOS Y RESPALDOS

La estructura interior del sillón está fabricada en madera maciza, con laterales en MDF. El sistema de suspensión del asiento y respaldo se basa en cinchas elásticas NEA de alta durabilidad. El alto contenido de caucho en las cinchas NEA les proporciona una gran resistencia y un excelente rendimiento.

El conjunto está recubierto con espuma de poliuretano flexible de alta densidad: 30 kg/m³ en los asientos y 28 kg/m³ en los respaldos, con resiliencia HR. Tapizado de asiento y piecera continuo para evitar huecos que puedan causar lesiones.

BRAZOS

Los brazos cuentan con una estructura interna de madera maciza y laterales de aglomerado. Están recubiertos con espuma de poliuretano flexible de alta densidad (28 kg/m³) y resiliencia HR.

También existe la posibilidad de incorporar brazos tapizados extraíbles para facilitar la transferencia lateral del usuario.

PATAS

De madera maciza barnizadas en color natural, nogal o roble.

MECANISMOS

Mecanismo relax manual: permite al usuario regular de forma manual la inclinación coordinada de respaldo y piecera.

Mecanismo relax manual - posición GRAVITY ZERO: permite al usuario regular de forma manual la inclinación coordinada de respaldo y piecera.

Incluye la posibilidad de adoptar la **posición GRAVITY ZERO**. En esta posición, las piernas quedan al mismo nivel que el corazón para favorecer la circulación sanguínea. Es una posición de relax donde los músculos lumbares y cervicales se relajan al ejercer menor presión sobre ellos.

Mecanismo relax motor: permite al usuario regular mediante un mando la inclinación deseada. Alimentación mediante corriente eléctrica.

En la apertura, manteniendo el botón pulsado, se puede completar el recorrido hasta la posición final de relax o interrumpir el recorrido en cualquiera de los puntos intermedios.

Una vez cerrado vuelve a la posición de sentado.

Mecanismo relax motor + reincorporación: permite al usuario regular mediante un mando la inclinación deseada. Alimentación mediante corriente eléctrica.

En la apertura, manteniendo el botón pulsado, se puede completar el recorrido hasta la posición final de relax o interrumpir el recorrido en cualquiera de los puntos intermedios.

Una vez cerrado, con el mismo botón, el usuario puede continuar el recorrido hasta la puesta en pie.

Design: **Seniorcare Estudio**

En las versiones eléctricas existe también la posibilidad de incorporar, opcionalmente, la posición **GRAVITY ZERO**. En esta posición, las piernas quedan al mismo nivel que el corazón para favorecer la circulación sanguínea. Es una posición de relax donde los músculos lumbares y cervicales se relajan al ejercer menor presión sobre ellos.

TRANSIT

La versión TRANSIT incorpora asa de traslado y ruedas de diámetro 75 mm modelo Ágila de Tente, de máxima calidad, dos de ellas con freno, lo que permite el bloqueo del sillón cuando está en reposo.

Las ruedas del New Cloe cumplen con la norma **UNE-EN 12530:1999**

Ruedas y soportes rodantes. Ruedas y soportes rodantes para equipamiento de colectividades accionados manualmente.

ENSAYOS REALIZADOS. ADECUACIÓN A LA NORMA.

Ensayos realizados en: **AIDIMME. INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES**

Los ensayos realizados sobre el modelo son los indicados y aplicables, según las normas:

UNE-EN 16139:2013vc2015, Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico para unas condiciones de uso de Nivel 1 General.

Los procedimientos de ensayo vienen descritos en las normas:

UNE-EN 1728:2013, Mobiliario. Asientos. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y la durabilidad,

UNE-EN 1022:2019 Mobiliario. Asientos. Determinación de la estabilidad.

Los ensayos se han realizado según el procedimiento descrito en las normas mencionadas y el resultado ha sido **CONFORME**.

Adicionalmente, se ha realizado el ensayo de Durabilidad del mecanismo de reclinado, según norma **UNE EN 13759:20121** Mobiliario. Mecanismos para funcionamiento de asientos y sofás cama.

Habiéndose aplicado el número de ciclos estipulado, no se produce pérdida de funcionalidad.

ECOLOGÍA

Certificado ISO 14001.

Los procesos de producción de SENIORCARE INTERIORS están certificados según las normas medioambientales ISO 14001 con el fin de minimizar cualquier impacto sobre el medio ambiente.

Seniorcare Interiors posee el Certificado de Inscripción en el Registro de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de Absorción de CO₂ del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Código huella de carbono:2024-a3268

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

Certificado ISO 9001

SENIORCARE INTERIORS tiene certificada su gestión de calidad conforme a la normativa ISO 9001 en todos los procesos de diseño, fabricación y comercialización de sus productos.

GARANTÍA

5 años

ACABADOS

Maderas: patas disponibles en color natural, nogal o roble.

Tejidos: todos los tejidos indicados en nuestro libro de acabados.

Todos nuestros tejidos —excepto el Apollo— son vinílicos y cuentan con propiedades antibacterianas, antimicrobianas y antimicóticas.

Presentan una alta resistencia a la abrasión, alcanzando en algunos casos hasta 300.000 ciclos Martindale.

PESO RECOMENDADO

140 - 150 kilos

Información técnica / Technical information / Information technique



Sillón relax CLOE asiento
continuo
CL00011
H 108 x W 74 x D 95/170 cm
SH 46 cm | AH 62 cm



Sillón relax CLOE
posición ZERO
CL00020
H 108 x W 74 x D 95/170 cm
SH 46 cm | AH 62 cm



Sillón relax CLOE motor +
reincorp. + posición ZERO
CL00030
H 108 x W 74 x D 95/170 cm
SH 46 cm | AH 62 cm



Aumento opción sill
traslado
CLO00110

Design: **Seniorcare Estudio**



senior**care**

Camino de la Estación s/n
Polig. i-4, Parcela 5
03330 CREVILLENTE (Alicante)
Tels.: +34 96 540 53 30 / 96 540 35 12
Fax: +34 96 668 05 62
e-mail: info@seniorcare.es

www.seniorcare.es